

# LEAKAGE:MASTER

Der elektronische Dichtigkeitstester




# LEAKAGE:MASTER

## Elektronischer Dichtigkeitstester

Der LEAKAGE:MASTER dient zur elektronisch gesteuerten Prüfung und Überwachung flexibler Endoskope auf Dichtigkeit und ersetzt die weit verbreitete, manuelle Dichtigkeitsprüfung. Der LEAKAGE:MASTER erkennt bereits beim „Automatic Test“ (Trockentest) nach weniger als zwei Minuten Mikroperforationen und vermeidet damit kostspielige Reparaturen.


Der LEAKAGE:MASTER verhindert durch permanente Luftzufuhr das Eindringen von Flüssigkeit in die Endoskope. Er hält einen Gegendruck von ca. 240 mbar während des gesamten Aufbereitungsprozesses. Bei Undichtigkeiten im Endoskop erfolgt ein optisches und akustisches Warnsignal. Der Gegendruck im LEAKAGE:MASTER wird so lange aufrecht erhalten, bis das Endoskop aus der Flüssigkeit entfernt wurde.

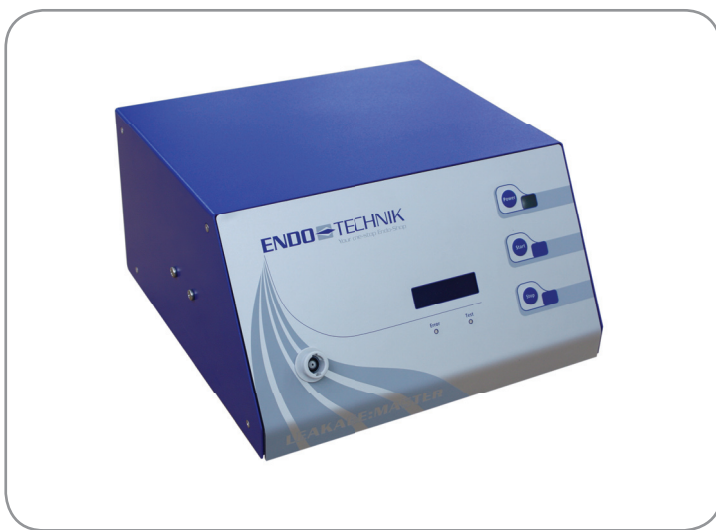


LEAKAGE:MASTER

### Produkteigenschaften

- » Für alle gängigen, flexiblen Endoskope geeignet
- » Erkennt Mikroperforationen in weniger als zwei Minuten
- » Genaue Anzeige durch Display
- » Optisches und akustisches Warnsignal
- » Dichtigkeitsüberwachung während der gesamten Aufbereitung

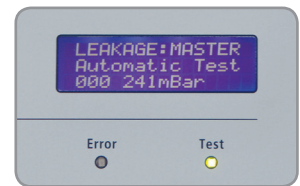

Display

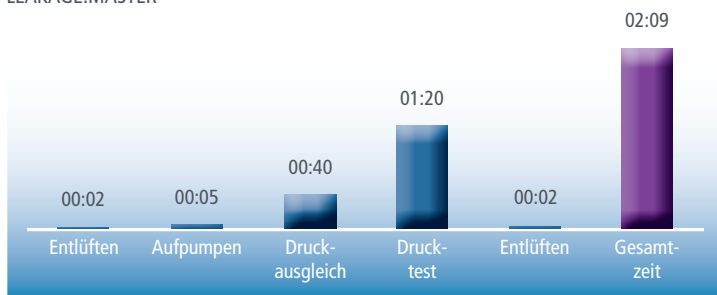

LEAKAGE:MASTER Automatik Programm (Prüfdruck: 240 mbar)

### Testprogramme

**Automatik Test:** 1. Druckaufbau und Luftausgleich, 2. Vergleichende Messung, 3. Testergebnis durch Anzeige und Signal

**Permanent Test:** 1. Druckaufbau und Luftausgleich, 2. Erhalten eines konstanten Gegendrucks, 3. Testergebnis durch Anzeige und Signal

# LEAKAGE:MASTER

#### Artikel-Nr.

7900-PL10

#### Lieferumfang

Elektronischer Dichtigkeitstester, 1 x Netzkabel 2 m, 2 x Bedienungsanleitung

Dichtigkeitstestkappen müssen separat bestellt werden.


# LEAKAGE:MASTER

## Elektronischer Dichtigkeitstester und Zubehör

Das Gerät erkennt bereits beim „Automatic Test“ (Trockentest) kleinste Mikroperforationen und verhindert Schäden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit entstehen könnten. Der LEAKAGE:MASTER hilft, hohe Reparaturkosten an Endoskopen zu vermeiden und sollte deshalb in keiner Endoskopieabteilung fehlen.

### Vorteile


- » Hoher Schutz vor Flüssigkeitseinbruch in flexible Endoskope der Hersteller Olympus, Fujinon und Pentax
- » Beugt hohen Reparaturkosten bei Schäden durch Flüssigkeitseinbruch vor
- » Sparen Sie Zeit und Kosten. Nutzen Sie unsere präzise Technik.

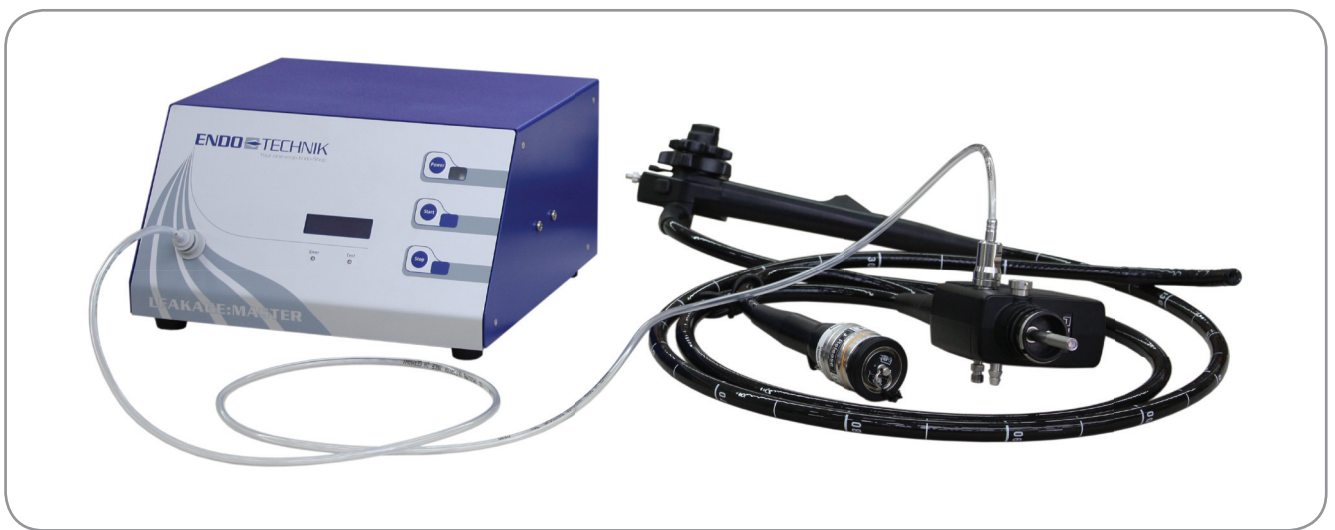

LEAKAGE:MASTER mit angeschlossenem Endoskop

### Technische Daten

Netzspannung: 230 V / 50 Hz  
 Sicherung: 2 x 1,25 A  
 Prüfzertifikate: VDE 0750 (part 1/05.02)  
 Breite: 280 mm  
 Höhe: 150 mm  
 Tiefe: 300 mm

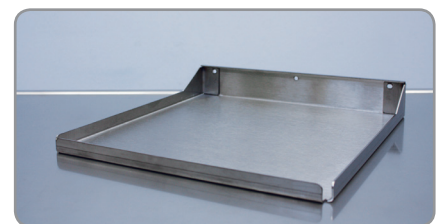

Artikel.-Nr.: 7000-090



## LEAKAGE:MASTER ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Zubehör
7526-RF-PE-LM	Dichtigkeitstestkappe nur für Pentax Endoskope
7526-OL-LM	Dichtigkeitstestkappe nur für Olympus Endoskope
7526-FU-LM	Dichtigkeitstestkappe nur für Fuji Endoskope

### Optionales Zubehör

7903-005	Verbindungskabel zwischen LEAKAGE:MASTER und WASH:MASTER (ab der Seriennummer 973)
7000-090	Wand- und Wagenhalterung aus rostfreiem Edelstahl



Wagenprogramm



Endoskopie Zubehör  
Krankenhaus- und Praxisausstattung



Elektrisches Zubehör  
Krankenhaus- und Praxisausstattung



Flexibles Zubehör

ENDO-TECHNIK W. Griesat GmbH  
Heiligenstock 32  
42697 Solingen  
Germany

Tel.: +49 (0)212 / 267 43-0  
Fax: +49 (0)212 / 267 43-50

E-Mail: [info@endo-technik.de](mailto:info@endo-technik.de)  
Internet: [www.endo-technik.de](http://www.endo-technik.de)